


UPUTE ZA SLANJE UZORAKA



**PRIJEM UZORAKA
UZORKOVANIH IZVAN
KBC-a ZAGREB**

***Zelena zgrada, suteren, soba br. 2
ponedjeljak - petak 7:00 – 13:00 sati***

***Izvan naznačenog vremena primaju se isključivo uzorci za koje je potrebna hitna obrada:
bijela zgrada Poliklinike KBC-a Zagreb, centralni prijem KZLD-a, 2. kat***

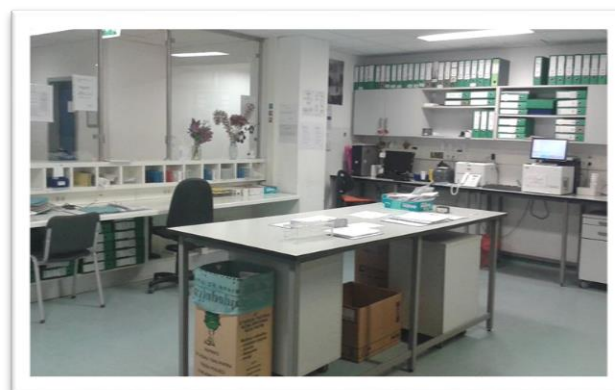

UPUTE ZA SLANJE UZORAKA

SLANJE UZORAKA

Bez predbilježbe se primaju:

- uzorci uzeti djeci, trudnicama, hematološkim i onkološkim pacijentima
- uzorci uzeti ležećim bolesnicima u suradnim ustanovama
- uzorci za farmakogenetičke pretrage i određivanja koncentracije lijekova
- uzorci za citogenetske pretrage, ali uz prethodni dogovor (vidjeti dalje)

Za sve ostale uzorke slanju mora prethoditi predbilježba:

- osobno
- fax-om: +385 01 4920-217
- e- poštom: predbiljezbe.lab@kbc-zagreb.hr
- kontakt obrascem dostupnim na mrežnoj stranici KBC-a Zagreb: <https://www.kbc-zagreb.hr/kako-se-naruciti.aspx?clinicid=77>

Ispravno označeni biološki materijal (čitko ispisani generički podaci o pacijentu - ime, prezime i godina rođenja) dostaviti u Odjel za predanalitiku, informatiku i kontrolu kvalitete KZLD-a, isti dan u najkraćem mogućem roku, poštujući uvijek odgovarajuće prijeanalitičke uvjete (informacije o istima - <https://www.kbc-zagreb.hr/katalog-pretraga.aspx>). Uz uzorak obavezno poslati i podatke potrebne za dohvat e-Uputnice (točan datum rođenja, MBOO ili OIB) ili uputnicu suradne ustanove.

SLANJE UZORAKA UZ HZZO e - UPUTNICU

Uz podatke potrebne za dohvat e-Uputnice obavezno dostaviti potvrdu o narudžbi i informaciju o vremenu uzimanja uzorka.

SLANJE UZORAKA UZ UPUTNICU SURADNE USTANOVE

Osim generičkih podatka bolesnika na uputnicu obavezno upisati matični broj osigurane osobe ili osobni identifikacijski broj (MBOO ili OIB) bolesnika (za potrebe evidencije u bolnički informacijski sustav) te obavezno navesti vrijeme uzimanja uzorka.

SLANJE UZORAKA EKSPRESNIM SLUŽBAMA

- Uzorak zapakirati odvojeno od uputnica u zaštitne spremnike kako bi se spriječilo istjecanje uzorka i kontaminacija ljudi i okoline.
- Uzorak ne slati redovnom poštom, već nekom od ekspresnih službi dostave koja će uzorak dostaviti u KZLD istog dana kad je uzet (HP Express, DHL, FedEx i dr.).
- Uzorak dostavljen običnom poštom nije prihvatljiv za laboratorijsku obradu.

SLANJE UZORAKA SANITETSKIM ILI DRUGIM VOZILOM

Uzorke za obradu moguće je poslati i sanitetskim ili drugim vozilom.

SLANJE UZORAKA –POSEBNI ZAHTJEVI

ZA METABOLIČKE PRETRAGE

Uz biološki materijal i uputnicu potrebno je poslati popunjen i potpisan „Obrazac za metaboličke pretrage” (dostupan na KBC mrežnoj stranici <http://www.kbc-zagreb.hr/wp-content/uploads/2018/07/Obrazac-za-metaboli%C4%8Dke-pretrage-13.06.2018..pdf>). Prije slanja uzorka bioptata kože u sterilnom hranilištu, obavezan je prethodni dogovor na tel: 01/2367-243.

ZA KOAGULACIJSKE PRETRAGE

Prije slanja uzoraka obavezan je prethodni dogovor na tel: 01/2367-262.

ZA MOLEKULARNU HEMATOLOGIJU

Biološki materijal iz drugih ustanova slati u odgovarajućem pakiranju na temp. 2-8°C do prijema u suterenu zelene zgrade, soba br.2 - isti dan do 12h.

ZA PRENATALNU DIJAGNOSTIKU

Uzorke za gensku analizu (plodova voda, korionske resice i tkivo spontanog pobačaja u epruveti s hranjivom podlogom) slati isključivo na ruke osoblja Odjela za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku (soba 373, 3. kat, bijela zgrada Poliklinike) uz prethodni dogovor na broj telefona 01 2367 268.

Uzorke za kariogram (plodova voda, korionske resice, tkivo spontanog pobačaja te bioptat kože) slati na temp. 4-25°C odmah nakon uzorkovanja do 13h uz prethodnu najavu na broj telefona 01 2367 347.

Uzorke za brzo otkrivanje aneuploidija slati ponedjeljkom do 13 h i utorkom do 12 h, uz prethodnu najavu na broj telefona 01 2367 347.

ZA KARIOGRAM I FISH DIJAGNOSTIKU

Periferne krvi slati isključivo ponedjeljkom i utorkom do 13 h na 4-25°C uz obveznu prethodnu najavu na brojeve: 01/2367-234 ili 091/4922-063.

Koštane srži slati odmah nakon uzorkovanja i/ili unutar 24h do 13h na temperaturi 4-25°C.

ZA DIJAGNOSTIKU UNIPARENTALNE DISOMIJE, HEMOFILIJE TE PRETRAGE MLPA I ACGH

Periferne krvi slati na temperaturi 4-25°C radnim danom do 13h uz obaveznu prethodnu najavu i dogovor na broj telefona 01 2367 347.

ZA IMUNOFENOTIPIZACIJU	Uzorke iz udaljenijih suradnih ustanova, kao i uzorke iz zagrebačkih ustanova tijekom ljetnih mjeseci slati na temperaturi od 2-8°C (tj. na ledu). Za Imunofenotipizaciju periferne krvi uz biološki uzorak OBAVEZNO dostaviti Vaš nalaz Kompletne krvne slike (KKS) istog uzorka.
---------------------------	---

LIKVOR	Likvor skupljati u sterilne staklene epruvete bez ikakvih dodataka (nikako ne u epruvete s aktivatorom zgrušavanja sa ili bez inaktivne smole). Uzorke likvora kojima nije potrebna citološka obrada obavezno centrifugirati (10 minuta na 3500 okretaja/min) i bistri supernatant odvojiti u čiste epruvete. Epruvete jasno označiti (ime i prezime pacijenta, godina rođenja i vrsta uzorka) i osigurati od razbijanja i/ili prolijevanja. Uputnicu popuniti čitko i s jasno definiranim pretragama koje se traže (npr. nije uputno pisati: “obrada na MS” već je potrebno navesti točne nazive svih pojedinih pretraga). Na uputnici obavezno naznačiti broj telefona za kontakt i vrijeme uzimanja uzorka. Uzorak likvora nikako ne zamrzavati. Kada je to potrebno, uz likvor poslati i uzorak seruma.
--------	---

NAPLATA USLUGE

BOLESNICIMA S DOPUNSKIM OSIGURANJEM	Potrebno je dostaviti broj iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja i navesti osiguravatelja.
---	--

BOLESNICIMA BEZ DOPUNSKOG OSIGURANJA	Služba financija i obračuna KBC-a Zagreb za uzorke primljene poštom šalje obavijest s detaljima uplate na kućnu adresu bolesnika.
--	---

BOLESNICIMA OSLOBOĐENIM PLAĆANJA PARTICIPACIJE	Na uputnici obvezno naznačiti po kojem članu je bolesnik oslobođen plaćanja participacije.
---	--

Za sve uzorke uzorkovane izvan KBC-a Zagreb nalaz je moguće dostaviti standardnom, e-poštom, ili telefaksom uz popunjen i **potpisan** „Zahtjev za slanje nalaza“ (dostupan na KBC mrežnoj stranici <http://noviweb1.kbc-zagreb.hr/wp-content/uploads/2017/01/Zahtjev-za-slanje-nalaza11.pdf>). Svi nalazi napravljeni temeljem e-Uputnice dostupni su pacijentima putem Portala zdravlja na platformi e-Građani.

**ZBOG POSEBNIH PREDANALITIČKIH UVJETA, UZORCI ZA NAVEDENE
PRETRAGE NE SMIJU SE UZORKOVATI IZVAN KZLD-a**

ACTH

LAKTAT

AMONIJAK

KRIOGLOBULINI

ACIDOBAZNI STATUS
